



Notice d'utilisation

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez de recevoir vos housses anti-acariens Protec'Som[®] et nous vous remercions de votre confiance. Vos housses sont des dispositifs médicaux de haute technologie mises au point par Protec'Som[®]. Elles sont fabriquées sous processus certifiés ISO 13485 (norme de fabrication des dispositifs médicaux). Elles sont destinées aux patients allergiques aux acariens. Leurs qualités de filtration en font de véritables barrières infranchissables entre les allergènes d'acariens et vous.

La confection soignée de vos housses Protec'Som[®] vous apportera toute satisfaction pendant de nombreuses années. Pour conserver à vos housses toute leur efficacité, lisez attentivement les conseils qui suivent.

Je reste à votre disposition. Bien cordialement,

Alexis Porée, Directeur Général

Votre médecin a diagnostiqué une allergie aux acariens. Votre housse anti-acariens fait partie des mesures indispensables à mettre en place pour en diminuer les symptômes.



Avant d'ouvrir l'emballage de vos housses ...

Assurez-vous de la bonne dimension de chacune des housses que vous avez commandées. Pour des raisons d'hygiène, nous ne pouvons remettre dans nos stocks une housse dont l'emballage a été ouvert.

Pour votre confort, un premier lavage avant utilisation rendra à vos housses toute leur souplesse.

Texaal® Coton

La dimension initiale de votre housse tient compte du futur rétrécissement lors des premiers lavages. Votre housse est donc plus grande que ce que vous avez commandé et aura sa taille normale seulement après quelques lavages.

Texaal® Polyester

La dimension ainsi que l'aspect de votre housse ne changeront pas au fil des lavages.

Noxaalon® et Noxaalon® Bamboo

L'aspect un peu raide de votre housse disparaîtra dès le premier lavage pour laisser place à un textile particulièrement doux et agréable. En lavant votre housse avant la première mise en service, vous bénéficierez de ce confort dès la première utilisation.



Aérez et aspirez consciencieusement le matelas sur les deux faces. Si vous n'êtes pas équipés de housses anti-acariens pour couettes et oreillers, lavez ces derniers consciencieusement une fois par mois à 60°C.



texaal®

noxaalon®

L'installation de votre housse




Si possible, mettez en place votre housse de matelas à deux personnes, ce sera beaucoup plus facile. Installez-vous de chaque côté du matelas et positionnez la housse «en accordéon».

Faites progressivement remonter la housse le long du matelas.



Les ouvertures de votre housse anti-acariens sont limitées au minimum car elles sont les principales sources de fuite des allergènes. Cela ne facilite pas la mise en place du matelas, mais est un gage d'efficacité supplémentaire.

Une fois la housse installée, fermez le zip. Afin de ne pas coincer le textile, nous vous conseillons de positionner votre doigt sous le curseur pendant la fermeture et l'ouverture du zip pour éviter les incidents.

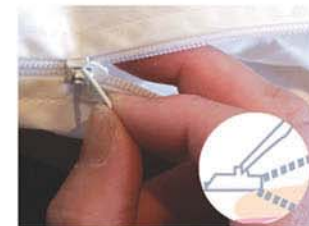

Si malgré vos précautions le tissu se trouve pincé au point de bloquer le curseur, ne prenez pas le risque de déchirer votre housse. Une astuce consiste à verser une goutte d'huile de table puis à dégager le tissu en le tirant sur le côté du curseur.

Dans tous les cas : déchirure, couture défectueuse, curseur bloqué ..., n'hésitez pas à nous appeler au numéro indiqué au dos. Nous vous apporterons des conseils et vous expliquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre housse.

Une fois vos housses anti-acariens installées, positionnez vos draps classiques et faites votre lit.




L'entretien de vos housses

Vos housses anti-acariens se lavent à 60°C et peuvent passer au sèche-linge. Reportez-vous aux indications apparaissant sur la vignette de composition et sur l'emballage de votre housse pour plus de précisions.

Nous vous conseillons de laver votre housse de matelas 2 fois par an et de laver vos housses de couettes et d'oreillers au minimum 6 à 8 fois par an, tous les mois si possible.

Comment limiter la prolifération des acariens

ÉVITEZ LA PRÉSENCE DANS LA CHAMBRE :

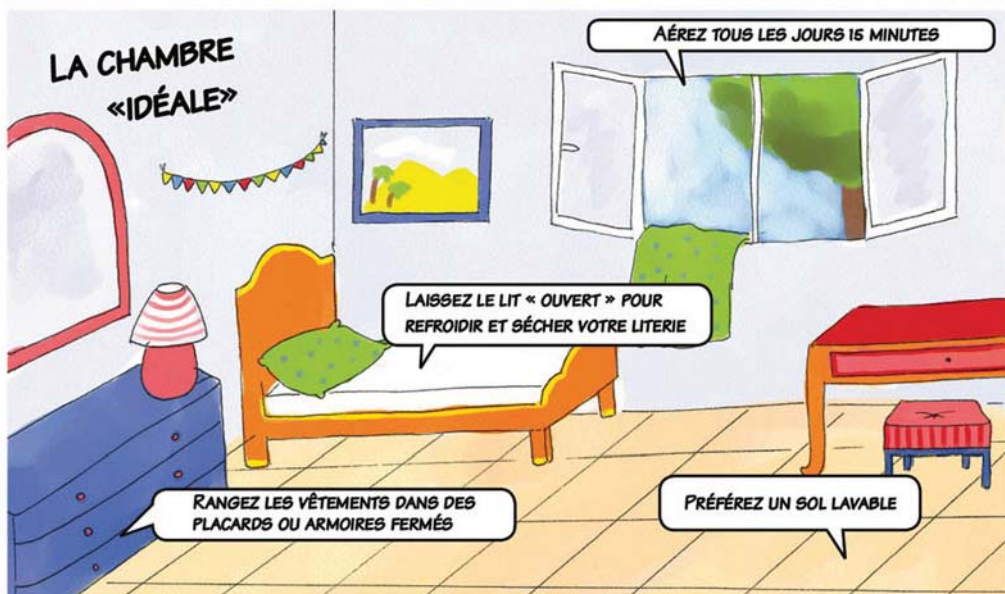

Laboratoire Protéc'Som,
Espace d'Armanville
24 rue du Train Renard
50700 Valognes

TOUTE L'ÉQUIPE PROTEC'SOM EST À VOTRE ÉCOUTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS...

France +33 (0)2 33 88 70 94
Belgique +32 (0)78 050 017

